



Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za izbiro kakovostne kompresijske rokavice GloriaMed. Lahka in udobna, zahvaljujoč uporabi finih sintetičnih prej, zagotavlja odlično udobje zgornjega uda pri venskih in limfnih boleznih.

Razred kompresije:

GloriaMed Sleeve® 101 - razred kompresije 1
GloriaMed Sleeve® 201 - razred kompresije 2

INDIKACIJE: Rokavice so namenjene zdravljenju primarnega in sekundarnega limfedema zgornjih okončin.

GloriaMed Sleeve® 101: razred kompresije 1

- Preprečevanje pooperativnega limfedema po mastektomiji z ali brez kemoterapije in radiološkega zdravljenja
- Zdravljenje blažjega limfedema
- Profilaksa ponavljajočih se edemov po dekonjestivnem zdravljenju

GloriaMed Sleeve® 201: razred kompresije 2

- Preprečevanje edema po doseženi dekonjestiji
- Kopičenje tekočine po mastektomiji in edem po radioterapiji
- Postoperativni in posttraumatski edem po osnovnem zdravljenju

KONTRAINDIKACIJE

- Nekontroliran limfedem
- Vnetje, odprte rane, okužbe
- Težave z arterijsko cirkulacijo zgornjega uda

Kompresijska rokavica mora biti uporabljena v skladu z navodili zdravnika specialista ali terapevta za limfedem. Gloria Med ne odgovarja v primeru neupoštevanja kontraindikacij ali kakršne koli zlorabe.

Kako obleči GloriaMed kompresijsko rokavico:



1. Zgornji del rokavice obrnite navzven do začetka zapestnega dela.
2. Pomagajte si s prosto roko, tako da potegnete rokavico čez roko in raztegnete rokav na roki. Previdno potegnite preostanek rokavice enakomerno čez roko do pazduhe in nato do rame (velja za model s pasom).
3. Prepričajte se, da je rokav enakomerno razporejen po celotni roki in da ni zožitev ali gub.
4. Nato prilagodite silikonski trak in pas (velja za model s pasom).



Kako jo sleči:



Če želite sleči rokavico, prepognite zgornji del rokavice in jo nežno potegnite navzdol.

PRIPOROČILA ZA ČIŠČENJE GLORIAMED ROKAVIC

Za daljšo življenjsko dobo tega izdelka priporočamo, da natančno upoštevate spodnja navodila. Kompresijska oblačila naj se po možnosti perejo vsak dan ali vsaj vsak drugi dan.



Perite z mlačno vodo (ne nad 40°C) in blagim detergentom za občutljiva oblačila. Sperite in ožemite odvečno vodo, ne da bi obrnili rokavico. Po možnosti si pri tem pomagajte z brisačo. Sušite na sobni temperaturi, stran od vira toplote. Pri pranju v pralnem stroju priporočamo uporabo zaščitnih vrečk za perilo, ob upoštevanju zgornjih navodil.



Ne čistite, ne uporabljajte topil, bencina ali mehčalca.



Ne belite.



Ne sušite v sušilnem stroju.



Ne likajte.

POMEMBNO

- Za oblačenje elastičnih kompresijskih rokavic GloriaMed priporočamo uporabo gumijastih rokavic. Na voljo so tudi različni pripomočki za pomoč pri oblačenju in slačenju.
- Ostri nohti, trda in razpokana koža, zapestnice ali ročne ure z ostrimi robovi lahko povzročijo poškodbe in natrganine preje.
- Uporabljajte samo sredstva za nego kože, ki ne učinkujejo agresivno na proizvod in ne povzročajo tanjšanja niti.
- Ne režite nobenih štrlečih niti znotraj rokavice, ker lahko to povzroči nastanek lukenj ali raztrganin v tkanini.
- Območje ran, šivov ali razdražene kože ustrezno zaščitite s posebnim obližem, sterilno gazo ali higienskim oblačilom.

NOŠENJE

GloriaMed kompresijsko rokavico lahko nosite od jutra do večera, kar zagotavlja učinkovito terapijo v primerih limfedema. Ne nosite je med nočnim počitkom. Zelo pomembno je, da vaš zdravnik redno nadzira potek zdravljenja. Elastična rokavica po določenem obdobju redne uporabe izgubi začetno elastičnost, zato je pomembno preverjati izdelek vsaj vsakih šest mesecev.

SESTAVA

GloriaMed Sleeve® 101: 69% poliamid, 31% elastan
GloriaMed Sleeve® 201: 67% poliamid, 33% elastan



Proizvajalec: **GloriaMed S.p.A.** Via Diaz, 7 22017 Menaggio (Como)
• Tel. 0344 32123 Fax 0344 32035 • Email: gloriamed@gloriamed.it • www.gloriamed.com



Distributer: **Medigo d.o.o.** Gradnikove brigade 53
5000 Nova Gorica • Tel. 05 330 4610, 05 330 4611
Email: info@medigo.si • www.medigo.si